

CERTEST SARS-COV-2 CARD TEST

TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE ANTIGÉNIQUE

Procédure du test et interprétation des résultats :




1
Réaliser le prélèvement nasopharyngé chez le patient.



2
Ajouter 15 gouttes de réactif dans un tube à essai et introduire l'échantillon.



3
Mélanger vigoureusement la solution pendant 1 minute en tournant l'écouvillon sur les bords du tube à essai.

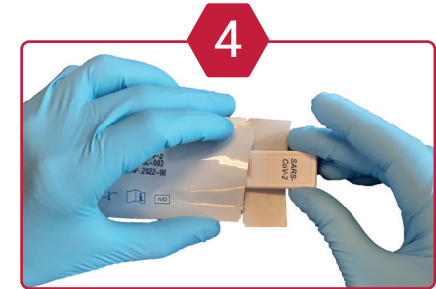

4
Retirer la cassette CerTest SARS-CoV-2 de son emballage de protection juste avant son utilisation.



5
Prélever 3 gouttes du tube à essai et déposez les dans la fenêtre marquée par la lettre « S ».



6
Lire les résultats après 10 minutes d'attente.
Ne pas interpréter les résultats après 10 minutes

Interprétation des résultats



Négatif



Positif



Invalide



Invalide