




i-Tracker

Tests haute performance pour le Monitoring des Biothérapies

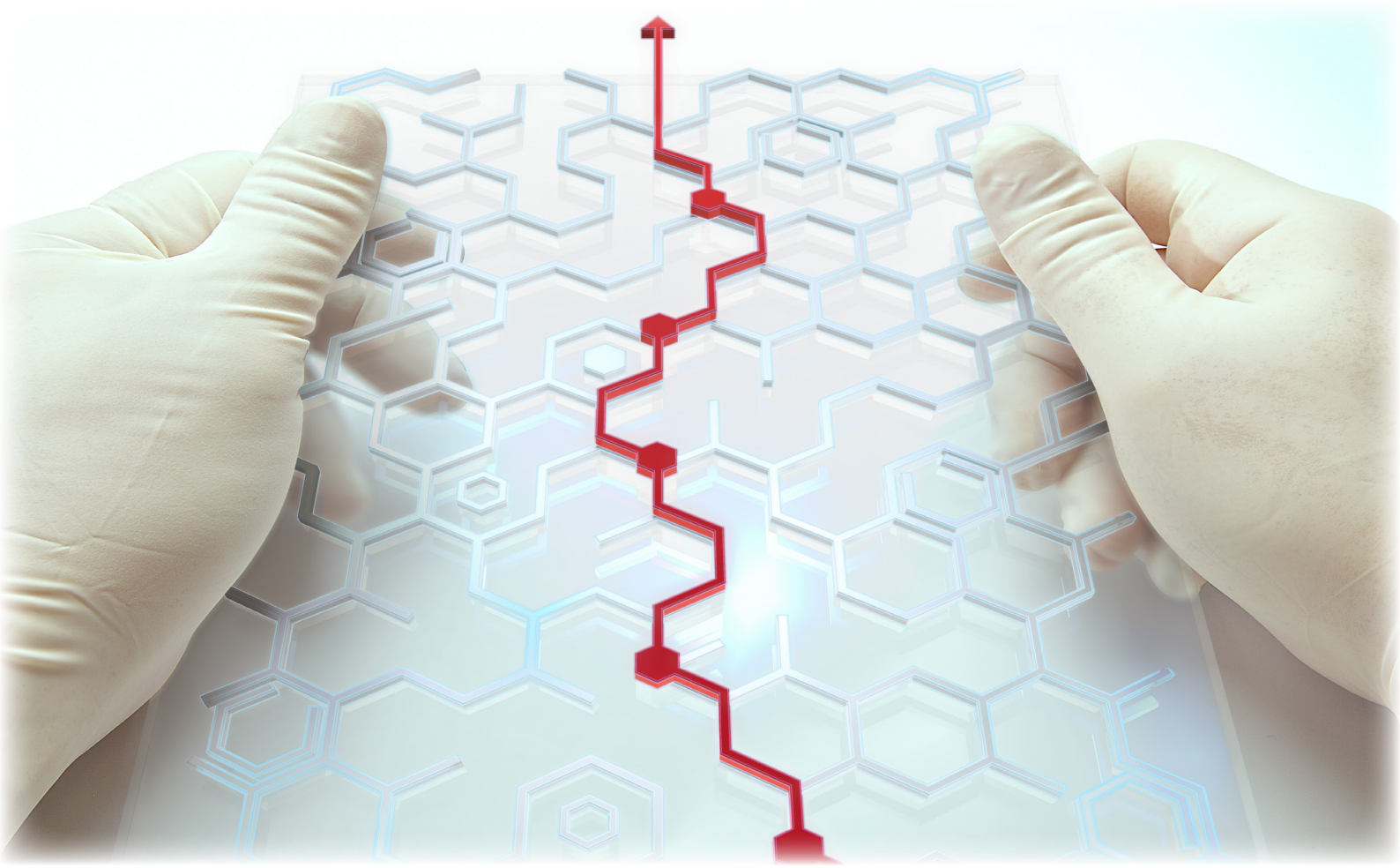

- Technologie CLIA innovante
- Rapidité de rendu de résultats
- Validés sur princeps et biosimilaires
- Calibrés sur les standards internationaux de l'OMS

ATTEINDRE L'EXCELLENCE DANS LE SUIVI DES PATIENTS SOUS BIOTHÉRAPIES


Le suivi pharmacologique des biothérapies ou monitoring des biothérapies (TDM) implique la mesure de la concentration de médicament et d'anticorps anti-médicament. Il permet d'ajuster la dose de médicament et d'assurer un dosage optimisé pour le patient. L'excellente performance des tests i-Tracker combinée à la rapidité de l'automate random-access i-Track¹⁰ apportent aux cliniciens la flexibilité leur permettant de prendre une décision thérapeutique au moment opportun. En facilitant l'ajustement rapide du traitement, les tests i-Tracker contribuent à améliorer les résultats cliniques du patient tout en minimisant les coûts de traitement.




Tests haute performance pour atteindre l'excellence

- Technologie Chemiluminescence (CLIA) innovante
- Mesure quantitative du médicament et des anticorps anti-médicament
- Premiers résultats en moins de 35 minutes, 60 résultats/heure
- Compatibilité complète avec l'automate random-access i-Track¹⁰
- Calibrés sur les standards internationaux infliximab (NIBSC/WHO#16/170) et Adalimumab (NIBSC/WHO#17/236)
- Validés sur les principes et biosimilaires
- Contrôles et calibrateurs inclus

Test Infliximab :

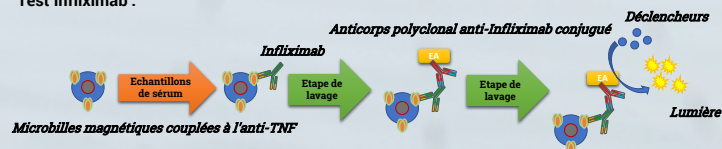

Test anti-Infliximab :

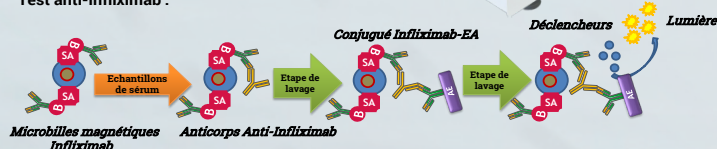

Les échantillons de sérum sont dilués et ajoutés à la suspension de billes magnétiques revêtues. Les analytes sont détectés via l'utilisation d'un conjugué à l'Ester d'Acridinium. Les RLU (unités relatives de lumière) obtenues sont détectées et quantifiées via l'automate i-Track¹⁰.

Gamme de mesure

Infliximab	0.3-24 µg/ml	Anti-Infliximab	10-2000 ng/ml
Adalimumab	0.5-24 µg/ml	Anti-Adalimumab	10-2000 ng/ml
Vedolizumab	1-60 µg/ml	Anti-Vedolizumab	10-2000 ng/ml
Ustekinumab	100-10000 ng/ml	Anti-Ustekinumab	1-250 UA/ml
Golimumab	0.3-8 µg/ml	Anti-Golimumab	10-2000 ng/ml
Rituximab	0.3-50 µg/mL	Anti-Rituximab	5-2000 ng/mL
Certolizumab Pegol	3-100 µg/mL	Anti-Certolizumab Pegol	10-1500 UA/mL



Référence	Désignation	Conditionnement
CTx 002-50/100	i-Tracker Médicament	50 / 100 tests
CTx 003-50/100	i-Tracker anti-Médicament	50 / 100 tests

x = Infliximab 100 tests / Adalimumab 100 tests / Vedolizumab 50 tests / Ustekinumab 50 tests / Golimumab 50 tests / Rituximab 50 tests / Certolizumab Pegol 50 tests (Etanercept 50 tests, Tocilizumab 50 tests, Risankizumab 50 tests, Natalizumab 50 tests et Ocrelizumab 50 tests: en développement)

i-Tracker Infliximab validé sur Infliximab principes Remicade® et infliximab Biosimilaires SB2 (Flixabi®) et CT-P13 (Remsima® et Inflectra®)
i-Tracker Adalimumab validé sur Adalimumab principes Humira® et Adalimumab Biosimilaires ABP 501 (Amgevita®) et SB5 (Imraldi®)



Contrôles de Qualité Interne

Une gamme de contrôles de qualité interne, prête à l'emploi et marquée CE dédiée au dosage pharmacologique des biothérapies.

Référence	Désignation	Conditionnement
CTx 002-PC	Immuno-Trol i-Tracker Médicament : Contrôle positif deux niveaux	2 x 500 µl
CTx 003-PC	Immuno-Trol i-Tracker anti-Médicament : Contrôle positif deux niveaux	2 x 1,5 ml

x = Infliximab / Adalimumab / Vedolizumab / Ustekinumab / Golimumab / Rituximab / Certolizumab Pegol (Etanercept, Tocilizumab, Risankizumab, Natalizumab et Ocrelizumab: en développement)



14 rue Ambroise Croizat
77183 Croissy Beaubourg
France

Phone : +33 (0) 1 64 62 10 12
Fax : +33 (0) 1 64 62 09 66
info@theradiag.com
www.theradiag.com



Photographies non contractuelles