

ProciseDx®

INSTRUMENTS POINT OF CARE



Suivre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.



Rapidité.

- Résultats quantitatifs en moins de 5 minutes.
- CRP, Infliximab, Adalimumab, Calprotectine fécale.

Simplicité pour tous.

- Prélèvement capillaire au bout du doigt sans préparation analytique.
- Prélèvement de selles intuitif et facile autogéré par le patient chez lui.

Fiabilité.


- Pour des consultations avec des réponses, sans multiplication de rendez-vous.
- Sensibilité et spécificité comparables au laboratoire.

BIOSYNEX


LA SOLUTION

Facile • Rapide • Précis

- Adapté au personnel soignant et aux soins primaires.
- Contrôles internes assurant des résultats quantitatifs fiables sans calibration ni maintenance.
- Système de lecture code-barres interne et externe pour une procédure simple et fluide.
- Interface intuitive avec écran tactile couleur 7 pouces.

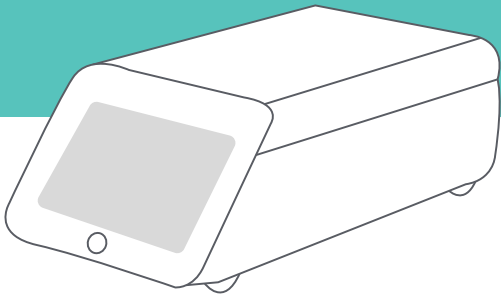

PROCÉDURE

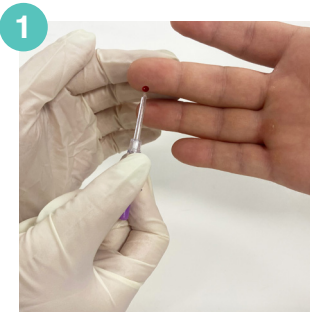

1 Prélevez 20 µL.



2 Déposez l'échantillon dans la cuvette.



3 Insérez la cuvette dans le puits de mesure.

Principe de la méthode

Fluorescence à résolution temporelle (*TR-FRET*) et Technologie Lumiphore®.

Temps de mesure

2-5 minutes.

Échantillon

Sang total capillaire, sang veineux, sérum, selles.

Volume d'échantillon

20 µl ou 5 mg.

Transfert de données

HL7, Via USB.

Connexion

Ethernet RJ45 ou Wi-Fi.

Dimensions

Portable (21 x 39 x 14,5 cm) ; 4,5 kg.

Imprimante

Externe.

RÉFÉRENCES PRODUITS

4390	Instrument PreciseDX	1 unité
4489	CRP Assay	20 tests
4828	IFX Assay	20 tests
4853	ADL Assay	20 tests
4664	FCAL Assay	20 tests & 20 Stool collection device
4913	Stool collection device	20 unités

Fabricant : Biosynex S.A (France).

Dispositifs médicaux de diagnostics in vitro.

Lire attentivement les instructions figurant dans les fiches techniques.

FLY_PROCISEDX_FR_V01202208R02

BIO SYNEX

BIOSYNEX S.A.

22 Boulevard Sébastien Brant

67400 Illkirch-Graffenstaden • France

Tél. : 03 88 78 80 88 • Fax : 03 88 78 76 78

E-mail : client.pro@biosynex.com

www.biosynex.com